

# Procomedic

*Procomedic*

[Socopedic](#)

▶  
[Airex](#)

[www.bebalanced.net](http://www.bebalanced.net)

Alcan Airex SA est leader mondial dans le domaine des tapis de gymnastique. Ceci est possible grâce à 50 ans d'expérience cumulée dans le domaine des matériaux en mousse. Des matériaux testés et une qualité suisse éprouvée durant le processus d'élaboration garantissent une grande longévité des produits, même dans des conditions d'emploi difficiles. Les produits de la marque AIREX® satisfont ou surpassent les actuelles dispositions légales en matière de substances constitutives et de mesures préventives visant à éviter les accidents. **Un équipe imbattable dans le domaine du sport et de la physiothérapie** Les physiothérapeutes professionnels, les thérapeutes sportifs et les entraîneurs de fitness connaissent la gamme AIREX® Balance pour ses produits de grande utilité offrant un large spectre d'utilisation. Alcan Airex propose maintenant aussi le programme des exercices correspondants, disponibles gratuitement sur Internet. En clair : plus rien ne peut contrecarrer le trio à succès composé des innovants produits Balance, des exercices à effectuer correctement et du savoir-faire du thérapeute.

- Nettoyage
- Désinfection
- Rangement
- Utilisation dans les bains et thermes
- Utilisation dans les piscines

Nous vous félicitons et vous remercions d'avoir choisi un produit AIREX. Nous vous prions, afin de profiter le plus longtemps possible des avantages offerts par nos matériaux alvéolaires spéciaux AIREX, fabriqués aux normes de la CE, de bien suivre la présente notice d'entretien.

**Nettoyage** Les nattes sales se nettoient avec une brosse douce et de l'eau tiède savonneuse ou complétée d'un produit de vaisselle. On peut laver les nattes dans le lave-linge mais ce n'est pas recommandable car peu pratique. S'il le faut malgré tout, on choisira un programme léger à 40°C maximum en utilisant les produits de lavage habituels. Ne jamais employer d'essence ou d'autres détachants!

**Désinfection** Grâce à leur caractéristique fongicide et bactéricide, les nattes de gymnastique AIREX n'ont en général pas besoin de désinfection.

Si les raisons hygiéniques spéciales exigent malgré tout une désinfection, on pourra utiliser une solution aqueuse de produits de nettoyage et de désinfection ménagers ou hospitaliers usuels (Merfen, Desogen, Kohrsolim, Kohrsolim FFF, Terralim).

Ne pas stériliser à la vapeur !

**Rangement** On peut enrouler la natte et la maintenir ainsi à l'aide de la sangle livrée à cet effet. Pour plusieurs nattes, l'idéal est de les poser sur un support à nattes ou de les entreposer à plat. Choisir un local sec et non chauffé lors d'un rangement de longue durée.

**Utilisation dans les bains et thermes** Lorsque les nattes AIREX sont utilisées dans un environnement chaud et extrêmement humide comme les bains et thermes, il est recommandé, pour en assurer la longue durée d'utilisation, de bien les rincer à l'eau régulièrement et de les sécher à l'air.

Utilisation dans les piscines


Les nattes AIREX résistent aux produits habituels de traitement de l'eau et de désinfection (chlore, hypochlorite, ozone etc.).

Il est recommandé (pour des raisons hygiéniques également) de les rincer à l'eau douce après usage et de les sécher à l'air.

Les nattes résistent en principe aux huiles et graisses végétales. Certaines huiles solaires ou émulsions peuvent toutefois modifier légèrement la surface et écourter la durée d'utilisation. Il est conseillé, dans ce cas, de protéger la natte à l'aide d'un textile, une serviette de bain par exemple.

Les nattes de gymnastique et de réhabilitation AIREX sont:

- sûres
- confortables
- hygiéniques
- pratiques
- écologiques

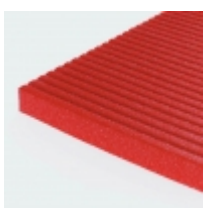

**Atlas**

Médical : Kinésithérapie, rééducation, pillâtes, exercices prénataux, Prévention Rééducation fonctionnelle, gymnastique, fitness, aérobics [\[Détails du produit...\]](#)



**Balance pad X-large**

Extra-long : plus de place pour vos exercices Possibilités d'utilisation illimitées Structure gaufrée sur le dessus et le dessous Utilisable des deux côtés Doux et confortable au toucher [\[Détails du produit...\]](#)



**Balance-beam**

Mesures de physiothérapie et de sport comme thérapie pour la récupération des fonctions du pied et de la marche.

[\[Détails du produit...\]](#)



**Balance-pad**


Exercices d'équilibre, de coordination et de réaction, entraînement à la stabilité statique et dynamique, exercices moteurs pour acquérir et maintenir la capacité d'équilibre.

[\[Détails du produit...\]](#)



**Balance-pad Elite**

Exercices d'équilibre, de coordination et de réaction, entraînement à la stabilité statique et dynamique, exercices moteurs pour acquérir et maintenir la capacité d'équilibre. [\[Détails du produit...\]](#)

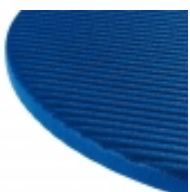


**Corona**

Médical : Kinésithérapie, rééducation, pillâtes, exercices prénatals, Prévention Rééducation fonctionnelle, gymnastique, fitness, aérobics [\[Détails du produit...\]](#)



**Coronella**

Médical : Kinésithérapie, rééducation, pilates Prévention Rééducation fonctionnelle, gymnastique, fitness, aérobics [\[Détails du produit...\]](#)

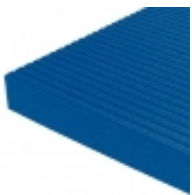

**Hercules**

Médical, Kinésithérapie, rééducation, support spécial pour tables de traitement, hydrothérapie [\[Détails du produit...\]](#)



**YogaPilates 190**

Pilates, yoga, fitness  
[\[Détails du produit...\]](#)